

Anleitung für die Entnahme von Schleimhautzellen bei Katze, Hund und weiteren Säugetieren (nach Absprache)

Für die Entnahme eines Abstriches aus der Mundhöhle benötigen Sie Wattetupfer, die wir Ihnen gerne kostenlos zusenden. Alternativ können Sie auch handelsübliche Wattestäbchen aus einer neuen Packung verwenden.

Pro Tier verwenden Sie bitte **zwei** Stäbchen. Für die Probenahme wird das Stäbchen in die Mundhöhle eingeführt und zur Wangeninnenseite geführt. Reiben Sie den Tupfer **gründlich** an der Innenseite der Maulschleimhaut und drehen ihn dabei, um möglichst viele Zellen abzureiben (Entscheidend ist die Aufnahme von genügend Zellmaterial und nicht von Speichel). Dies ist absolut schmerzfrei für das Tier. Die Mundhöhle des Tieres sollte möglichst frei von Futterresten sein (Probe nicht unmittelbar nach dem Fressen nehmen). Danach lassen Sie den Tupfer an der Luft antrocknen (ca. 5 Minuten). Die Tupferfläche bitte nicht mit den Fingern berühren! Den Tupfer in ein beschriftetes Probenkuvert (erhalten Sie mit den Stäbchen) stecken. Mit dem zweiten Tupfer verfahren Sie genauso wie mit dem ersten und stecken ihn ebenfalls in das gleiche Probenkuvert.

Verwenden Sie für jedes Tier einen extra Umschlag und beschriften Sie diesen oder die Probenröhrchen eindeutig mit der Identitätsbezeichnung des Tieres, von dem die Probe genommen wurde.

Falls Sie nicht unsere Tupfer, sondern handelsüblichen Wattestäbchen verwenden, verfahren Sie bei der Probenahme wie oben beschrieben. Bevor Sie das Stäbchen in einen neuen Briefumschlag stecken, schneiden Sie bitte die **nicht benutzte Seite** ab.

Bitte beachten sie diese Anleitung zur Probenentnahme sorgfältig. Für ein juristisch anerkanntes Gutachten sollte die Probenentnahme durch eine unabhängige Person protokolliert werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Kontakt:

Tel.: +49 (0)8092 8289-200, E-Mail: Appliedgenetics-eu@eurofins.com

Eurofins Genomics_Anleitung MHA Katze,Hund_v10_141021_DE_EBE

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie im Internet unter eurofinsgenomics.com abrufen können.
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Eurofins Medigenomix GmbH
Anzinger Straße 7 a
85560 Ebersberg
Deutschland

Tel.: +49 8092 8289-200
Fax: +49 8092 8289-201
E-Mail: info-eu@eurofins.com
Web: eurofinsgenomics.com

Geschäftsführer: Dr. Peter Persigehl,
Dr. Brigitte Obermaier, Bruno Poddevin, Ph.D.
Registergericht München HRB 207710
USt-IdNr.: DE815473648, Steuer-Nr.: 114/116/00167

HypoVereinsbank München
BLZ: 700 202 70, Kto.-Nr.: 273 50 40
IBAN: DE44 7002 0270 0002 7350 40
SWIFT: HYVE DEMMXX